

# IMOBILIZAÇÃO

## Sam Splint - Tala Moldável



Nenhum outro dispositivo oferece tantas variações para o tratamento de emergências ortopédicas quanto **Sam Splint**

A confecção da tala **Sam Splint** é baseada no antigo princípio de construção: 'curvas são fortes'.

A tala **Sam Splint** é fabricada como uma fina folha de liga de alumínio revestida em ambos os lados por uma densa espuma de células fechadas que pode ser flexionada em qualquer uma das três curvas simples, tornando-se extremamente forte e fornecendo o apoio necessário a qualquer membro fraturado ou lesionado.



### CARACTERÍSTICAS:

- À prova da água - Reutilizável - Leve e compacta
- Radioluciente - Ajustada ao membro afetado com fita adesiva ou bandagem de sua preferência - Não necessita de equipamento ou materiais extras - Não se altera com elevadas temperaturas ou altitude - Espuma densa e permeável, permite limpeza e desinfecção fácil e rápida - Compatível com todas as soluções de limpeza hospitalar padronizadas - Oferece maior estabilidade a todos os membros inclusive pescoço - Tamanho único de 90 cm, permitindo ser recortada no tamanho desejado para a imobilização.



# IMOBILIZAÇÃO

## Sam Sling - Cinta Pélvica



A cinta **Sam Sling** possui um design simples, de peça única, sem partes adicionais destacáveis. É compacta, fácil de usar - somente três etapas - e rápida de aplicar, normalmente em menos de um minuto.

Os cirurgiões de trauma de todo o mundo concordam com a importância da estabilização de fraturas pélvicas durante a crítica "golden hour" ou "hora de ouro" que segue ao trauma severo. A cinta Sam Sling é a primeira cinta pélvica circunferencial ajustável pela força desenvolvida e cientificamente comprovada para reduzir e estabilizar fraturas dos ossos pélvicos em livro aberto de modo seguro e eficiente.

Devido ao potencial risco de grave hemorragia associada a este tipo de fratura, o protocolo de primeiro atendimento inclui a aplicação de algum tipo de cinta circunferencial em torno dos trocanteres femorais (quadril).

### CARACTERÍSTICAS:

- Segurança para fraturas pélvicas - Fecho que mantém a força correta - aplicação simples em 3 passos - prática e econômica - Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz a pelve - cada cinta é testada individualmente - A parte frontal da cinta é estreita e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiologia intervencional, fixação externa e cirurgia abdominal - Radiolúcida; permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta - Reutilizável - O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão



A cinta Sam Sling está disponível em três tamanhos;  
PEQUENO: 69 a 119 cm de circunferência de quadril  
NORMAL: 81 a 127 cm de circunferência de quadril  
GRANDE: 91 a 152 cm de circunferência de quadril  
MILITAR: verde oliva 81 a 127 cm de circunferência de quadril